

# ニュー

# スキンクリーンコットン


## 特徴

- スキンクリーンコットンの繊維の毛細管現象により尿や下痢便を素早くおむつへ透過させ、皮膚障害を防ぎます。
- おしりはいつでも気持ち良いほど、サラサラキープ。
- おむつによる不快なムシや赤かぶれる皮膚のトラブルを予防できます。
- 必要な量だけちぎって使えるので経済的です。
- 一般可燃物として廃棄できます。

## 使用手順

### 1 袋から適量取り出します。

1回の使用量は  
1/2(10g)を目安に

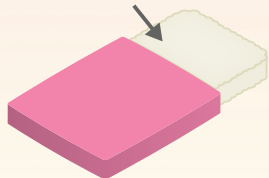

スキンクリーンコットンを袋から1/2(10g)ほど切り取り、広げてご使用ください。


### 2 必要な部位にあてがいます。



#### 尿失禁の際

**女性の場合**はスキンクリーンコットンを陰部に覆うように使用します。


**男性の場合**はスキンクリーンコットンで陰茎を覆うように巻き付けます。

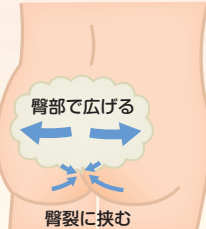

#### 便失禁(下痢)の際

スキンクリーンコットンを肛門部位および周辺にあて、ズレ予防のために臀裂で挟み、臀部から尾骨部にスキンクリーンコットンを広げます。

### 3 尿とりパッドまたはおむつをあてます。

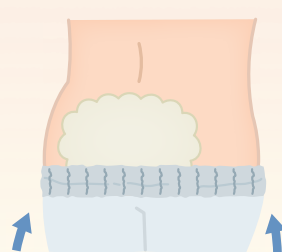

スキンクリーンコットンをあてた上から、尿とりパッドまたはおむつをあててください。以上で処置が完了です。

製品コード NSCC01

JANコード 4580362085632

1箱入数 20g × 10袋

価格 1,760円 [税抜価格 1,600円]

【発売元】



Batel Plus Corporation  
株式会社 ベーテル・プラス



WEBサイト

URL : <https://batelplus.jp> E-mail : [contact@batelplus.jp](mailto:contact@batelplus.jp)

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 新宿オミビル3F  
TEL 03-6427-6157 FAX 03-6427-6158



お問い合わせ