

Pライト

一般医療機器

医療機器届出番号：13B3X10255000001



特徴

- 創を損傷しにくいしなやかな低侵襲の素材を使用しています。
- 皮膚表面からポケット部の位置確認ができます。
- 計測時間が短縮でき、また測定サイズの正確性が向上します。
- フレキシブルなのでどんな体位でも計測可能です。




Batel Plus Corporation
株式会社 ベーテル・プラス

Pライト

東京大学大学院医学系研究科
健康科学 看護学専攻 老年看護学／創傷看護学分野
真田研究室仕様

使用方法

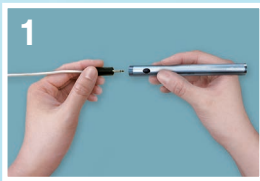


①接続する




②ディスポカバーを
取り付ける



③裏紙(白)を剥がす

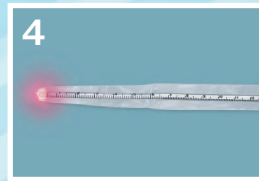

④ライトを点灯させ、
ポケット部に挿入する

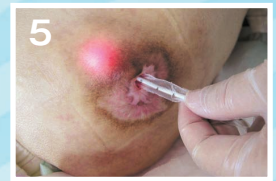

⑤最深部に到達した時点で、
皮膚表面に透過された
ライトをガイドにして、
ポケットサイズを計測する。



◀使用方法を動画で確認することができます。

Pライト内容・価格



製品名：Pライトセット(PR001+PR002)
製品コード：PR000
JANコード：4580362080170
価格／組：15,730円 [税抜価格14,300円]
※一般医療機器



製品名：スケールチューブ
製品コード：PR004
JANコード：4580362080224
価格／本：5,500円 [税抜価格5,000円]



製品名：Pライト(PR004+PR005)
製品コード：PR001
JANコード：4580362080194
価格／組：14,080円 [税抜価格12,800円]
※一般医療機器



製品名：電池ケース
製品コード：PR005
JANコード：4580362080231
価格／本：8,800円 [税抜価格8,000円]



製品名：ディスポカバー
製品コード：PR002
入数：100枚／箱
JANコード：4580362080200
価格：3,080円 [税抜価格2,800円]

※ PR003は2019年03月で廃番となりました。

使用上の注意

- ディスポカバーは単回使い捨てとなり、再使用は出来ません。
- ディスポカバーは未滅菌となります。必要に応じて滅菌利用ください(滅菌方法:EOG)
- 生理食塩水で患部を洗浄後、使用してください。
- 使用中は製品を注意深く観察し、破損、変形等があれば直ちに使用を中止してください。
- ライトが暗い、点灯しない場合は電池交換(単4×2本)をおこなってください。
- 本製品は故障箇所にかかわらず修理致しかねます。故障時は新品の部品をお買い求めいただき、交換頂く形となります。

【耐用年数】チューブ：半年／電池ケース：1年 ※保証期間の定めはございませんが、初期不良の対応は致しております。

【発売元】

 Batel Plus Corporation
株式会社 ベーテル・プラス



WEBサイト

URL : <https://batelplus.jp> E-mail : contact@batelplus.jp

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 新宿オミビル3F
TEL 03-6427-6158 FAX 03-6427-6158



お問い合わせ