

かんたん  
着脱

弾性着衣着脱補助具

# BP グリップシート

弾性着衣の着脱を補助するシートです。



製品名	BP グリップシート(小)	BP グリップシート(大)
製品コード	GS01	GS02
サイズ	20×27.5cm	30×40cm
JANコード	4580362083065	4580362083140
価格(税抜)	1,800円	2,700円

## 使用方法

※シートを利用するのは **STEP 3** からです。



STEP  
1

グリップシートを床に置いてください。  
(絨毯ですと滑りやすく効果が発揮されませんので、安定した平らなフローリングの床を推奨します。)



STEP  
2

弾性ストッキングにそのまま足先を入れます。  
(この際、一般的なかかとまでの生地裏返しを行いません。)  
両手で足を包むように支えながら、生地を引き上げていきます。  
※写真のように滑り止め付きの補助グローブを併用いただくと、より効果的です。



STEP  
3

かかとの位置まで来たら、足裏の生地をグリップシートにしっかり密着させたまま、足を前方に押し出すようにしながら、かかと部分を前方に滑らせ、同時に両手で生地を引き上げます。



STEP  
4

引き続き、両手で足を包むように支えながら、最後まで履き上げます。



STEP  
5

さいごに生地全体のシワをのばして整えます。

グリップシートの使い方を動画でご覧いただけます。



発売元

**Batel** 株式会社 ベーテル・プラス

URL <https://batelplus.jp>

E-mail [info@batelplus.jp](mailto:info@batelplus.jp)

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 新宿オミビル3F

TEL 03-6427-6157 FAX 03-6427-6158