

## Pライト

## 【禁忌・禁止】

- 1] 本品をカバー未装着の状態では使用しないこと
- 2] 修理・改修・改造などの2次加工をしないこと
- 3] 連続点灯時間は30分をこえないこと（電池への過負荷となり、先端部の発熱を引き起こすおそれがあるため）

## 【形状・構造及び原理等】


本品は、電池ケース及びスケールチューブにより構成されている。

（組成） 電池ケース：黄銅 ニッケルメッキ他

スケールチューブ：塩化ビニール他


（本器の基本構成）

## 【電池ケース】

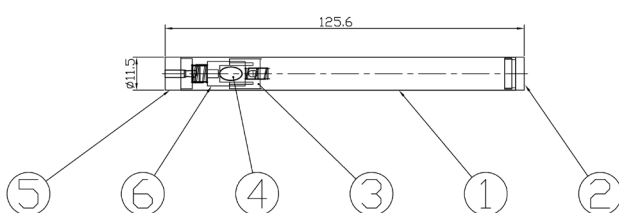

①パイプ②エンドキャップ③ガイド④ボタン⑤トップキャップ⑥基板

## 【スケールチューブ】

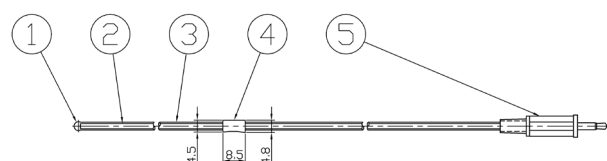

①LED ②コード ③チューブ ④カシメリング ⑤プラグ

## （作動・動作原理）\*

電池電源式で先端から光を発する。

## 【使用目的、効能又は効果】

洞、瘻、その他の空洞又は創部を探索するために用いる器具である。金属製及び軟性材料製の創を損傷しない素材を使用しており、組織を傷つせず、スケールチューブは柔軟なので、どんな体位でも計測可能。褥瘡ポケット部の大きさを簡単に・正確に計測できます。再使用可能である。

## 【操作方法又は使用方法等】

本品は、手技に精通した医療従事者の管理下で使用する

1. スケールチューブ先端に透明カバーを装着し、褥瘡ポケット内に挿入、最深部に当てる
2. 最深部に到達した時点での皮膚表面に浮かびあがる光と、目盛りを確認し、褥瘡ポケットの大きさを計測、記録する

## 【使用上の注意】

1. 使用注意
  - 1) 本品の使用により感作又はアレルギー反応を呈する可能性がある
  - 2) 使用中は製品を注意深く観察し、破損、変形等があれば直ちに使用を中止し、新品と交換すること
2. 重要な基本的注意
  - 1) 医療用の目的以外には使用しないこと
  - 2) 本品を無理に折り曲げたり、結び目を作ったりすると、断

線・断裂、その他の故障の原因となるので絶対に行わないこと

- 3) 使用前に各部品の汚れ、傷、破れ、接触不良等の異常がないか、必ず確認を行い使用すること
  - 4) 無理な力を加えると、破損の原因となるので絶対に行わないこと
  - 5) 粗雑な取扱は、製品の寿命を著しく低下させるので絶対におこなわないこと
  - 6) 損傷した場合には、異物の混入により誤作動の原因になるので、直ちに使用を中止すること
3. その他の注意

使用前には必ず、【保守・点検に係る事項】に示される保守・点

検を行うこと

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

## 1. 貯蔵・保管方法

- 1) 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で保管すること
- 2) 本体スイッチを切った状態で保管すること
- 3) 包装材料を傷つけたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと
- 4) 本品使用後は、電源をOFFにして電池ケースからスケールチューブを外すこと
- 5) 長期間使用しない場合は、電池ケースから電池を外すこと

## 【保守・点検に係る事項】

1. 本品は日常点検し、正常に作動することを確認すること
2. 計測器部に著しい劣化等が見られる場合は交換すること
3. 使用後は、感染防止に配慮して、速やかに消毒用アルコールを含んだ布で本品に付着した血液・消毒液等を取り除き、充分乾かしてから保管すること（職業感染防止のため）
4. 細部まで完全に汚れ及び付着物を取り除くこと
5. 本品に不具合が生じたときには、製造元または販売業者へ連絡すること

【包装】 1箱 - 1個入り

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

製造販売業者

株式会社ベータル・プラス

電話番号：03-6427-6157