

— ストーマ保護シールド —

ストーマプロテクター



さまざまな衝撃から
ストーマを保護します

安心

安全

ストーマプロテクターの特徴

- ✓ 目立たない控えめなデザイン
- ✓ 軽量でコンパクト
- ✓ マジックテープによる簡単着脱
- ✓ 取り付け時のベルト固定不要
- ✓ 防水加工でシャワー入浴可
- ✓ 本体は再利用可能

使用シーンの例

- 満員電車などの人混みで
- シートベルト着用時に
- 運動中の予期せぬ衝撃に
- 子供やペットと過ごす際に
- 家事や作業をしている時に
- ベルトがストーマ位置と重なる際に



Batel Plus Corporation
株式会社 ベーテル・プラス

ストーマプロテクターはしっかりと粘着固定が可能なマジックテープシールを利用し、ほぼ全てのストーマ装具やパウチカバーにも取り付けることが可能です。実用的で目立ちにくい形状で、皆様の活動的な生活の中に安心をお届けします。

スペック表

製品コード	規格	JANコード	価格
STP01	ストーマプロテクターセット (本体&シール10セット)	4582672302614	¥7,480(税込) ¥6,800(税抜)
STP02	ストーマプロテクター用シール (40セット)	4582672302621	¥2,970(税込) ¥2,700(税抜)


(素材) プロテクター本体：高強度ポリマー / シール：ポリエステル / プロテクター本体重量：7.4g

ストーマプロテクターの使い方


- ① シールを台紙からはがします。
- ② シールのマジックテープ側をプロテクター本体の受け側に装着します。(粘着面は外側に向ける)
- ③ 位置を合わせてストーマ袋の外側に接着します。



◀こちらのQRコードから
使用方法の動画をご覧になれます。

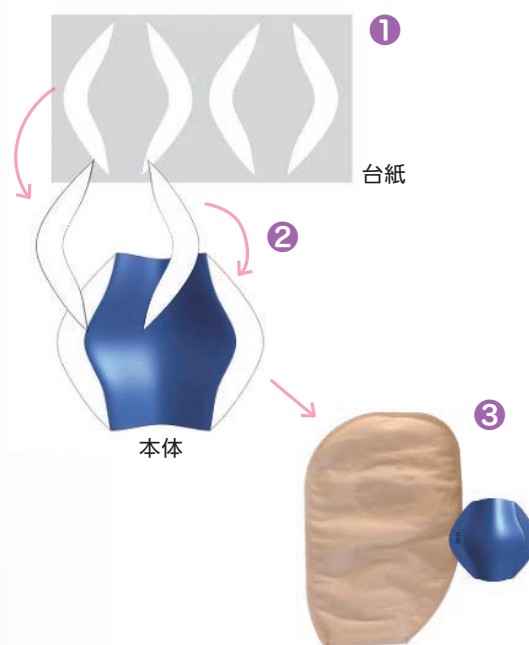

<サイズ>

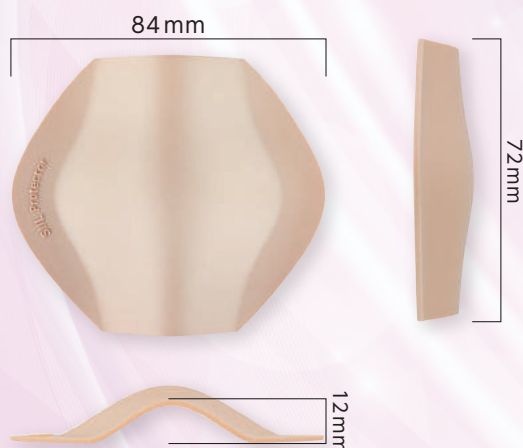

(注意事項)

※ストーマプロテクターをストーマ装具から取り外したり再度装着する際は親指と人差し指を使って行ってください。ストーマ装具を交換する毎に新しいマジックテープシールをお使いください。

※ストーマ袋内に溜まった内容物の重みで袋が下垂しプロテクター固定位置がストーマ位置よりも下にずれる場合がございます。位置ズレを防止したい場合など、必要に応じて腹帯等で上からサポートください。

【発売元】

Batel Batel Plus Corporation
株式会社 ベーテル・プラス



URL : <https://batelplus.jp> E-mail : contact@batelplus.jp

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 新宿オミビル3F

TEL 03-6427-6157

WEBサイト