

ハイブリッド型 弾性チューブ包帯 Kチューブ™

やさしくフィット



[色]ホワイト



[色]グレー

- 外部刺激からのお肌の保護に
- 圧迫治療の補助に
- むくみの圧迫療法に
- 弾性着衣の装着が困難な方に
- 就寝時の軽圧迫に
- ガーゼ等の固定に
- リンパ漏ケアの補助に
- アトピーの皮膚保護に

切ったり、重ねたり、
用途に合わせて
使い方いろいろ……

優れた高機能性

**抗菌防臭
加工付き**

**ラテックス
フリー**


**吸湿速乾
繊維使用**

**ソフトな
肌ざわり**

**両端ほつれ
防止加工**

※カットしてご使用の場合を除きます。

抗菌糸使用により、黄色ブドウ球菌・MRSA・緑膿菌・大腸菌等への抗菌効果あり

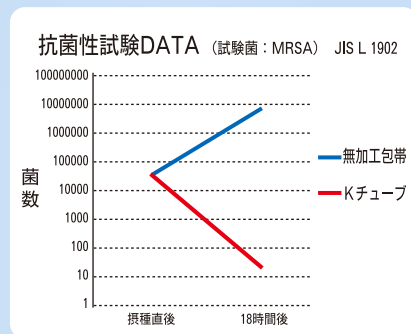

Kチューブ™ 製品ラインナップ

入数：1本／袋

製品コード	サイズ	色	幅	長さ	適用周径目安	JANコード	価格(税込)
KG1	1号(B)	グレー	6cm	1m	12~28cm	4580362085977	1,540円
K2	2号(D)	ホワイト	7.5cm	1m	15~32cm	4580362080040	1,650円
KL2	2号(D)	ホワイト	7.5cm	ロング(1.2m)	15~32cm	4580362086523	1,760円
K3	3号(E)	ホワイト	8.75cm	1m	17.5~37cm	4580362080057	1,650円
KG3	3号(E)	グレー	8.75cm	1m	17.5~37cm	4580362085984	1,650円
KL3	3号(E)	ホワイト	8.75cm	ロング(1.2m)	17.5~37cm	4580362086530	1,760円
K4	4号(F)	ホワイト	10cm	1m	20~42cm	4580362080064	1,650円
KG4	4号(F)	グレー	10cm	1m	20~42cm	4580362085991	1,650円
K5	5号(G)	ホワイト	12cm	1m	24~51cm	4580362080071	1,760円
KG5	5号(G)	グレー	12cm	1m	24~51cm	4580362086004	1,760円
K6	6号(H)	ホワイト	15cm	1m	30~64cm	4580362080088	1,760円
KG7	7号(J)	グレー	17.5cm	1m	35~76cm	4580362086011	1,760円

配合糸

【ホワイト】 コットン、ポリエステル、アクリル、ポリウレタン 【グレー】 コットン、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
 ※ホワイトとグレーは配合糸が異なるため、風合いが異なります。

使用手順の一例

腕の場合

折り返して二重に使用するパターン ※二重に着用することで2倍弱の圧迫圧になります。



①長い場合は必要な長さにカットします。



②生地を半分を腕に通します。



③残り半分を折り返しながら上に引き上げます。



④親指を出す部分に切り込みを入れてください。



⑤親指を通します。生地にシワがないかを確認してください。

脚の場合



①長い場合は必要な長さにカットします。



②生地にシワができないように引き上げ、装着してください。

使用上の注意

- 両端ほつれ防止加工をしていますが、カットした部分はほつれます。
- 上記使用手順は一例になりますので、その他装着方法につきましては医療者の方にご相談ください。装着部に傷・痛み等がある場合は医師等にご相談の上、ご利用ください。

【取扱方法】



最高洗濯温度
40℃
弱い手洗いのみ



塩素系及び
酸素系漂白剤の
使用禁止



日陰の
つり干しが
よい



アイロン掛け、
スチーム処理
できない



ドライ
クリーニング
禁止

- 手絞りの場合は弱く、遠心脱水の場合は、短時間で絞ってください。
- 漂白剤および乾燥機の使用は避けてください。
- 手洗い・陰干しを推奨しております。

Made in Japan

【発売元】

Batel Plus Corporation
 株式会社 ベーテル・プラス



URL : <https://batelplus.jp> E-mail : contact@batelplus.jp

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 新宿オミビル3F
 TEL 03-6427-6157

WEBサイト