

# Pライト

一般医療機器

医療機器届出番号：13B3X10255000001



## 特徴

- 創を損傷しにくいしなやかな低侵襲の素材を使用しています。
- 皮膚表面からポケット部の位置確認ができます。
- 計測時間が短縮でき、また測定サイズの正確性が向上します。
- フレキシブルな素材でどんな体位でも計測可能です。



Batel Plus Corporation  
株式会社 ベーテル・プラス

# Pライト

東京大学大学院医学系研究科  
健康科学 看護学専攻 老年看護学／創傷看護学分野  
真田研究室様

## 使用方法




①接続する



②ディスポカバーを取り付ける



③裏紙(白)を剥がす

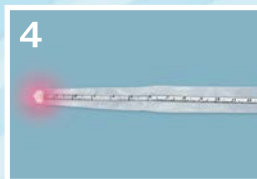

④ライトを点灯させ、ポケット部に挿入する



⑤最深部に到達した時点で、皮膚表面に透過されたライトをガイドにして、ポケットサイズを計測する。



◀使用方法を動画で確認することができます。

## Pライト内容・価格



製品名：Pライトセット(PR001+PR002)  
製品コード：PR000  
JANコード：4580362080170  
価格／組：17,050円 [税抜価格15,500円]  
※一般医療機器



製品名：スケールチューブ  
製品コード：PR004  
JANコード：4580362080224  
価格／本：5,500円 [税抜価格5,000円]



製品名：Pライト(PR004+PR005)  
製品コード：PR001  
JANコード：4580362080194  
価格／組：14,080円 [税抜価格12,800円]  
※一般医療機器



製品名：電池ケース  
製品コード：PR005  
JANコード：4580362080231  
価格／本：8,800円 [税抜価格8,000円]



製品名：ディスポカバー  
製品コード：PR002  
入数：100枚／箱  
JANコード：4580362080200  
価格：3,520円 [税抜価格3,200円]

※ PR003は2019年03月で廃番となりました。

## 使用上の注意

- ディスポカバーは単回使い捨てとなり、再使用は出来ません。
- ディスポカバーは未滅菌となります。必要に応じて滅菌利用ください(滅菌方法:EOG)
- 生理食塩水で患部を洗浄後、使用してください。
- 使用中は製品を注意深く観察し、破損、変形等があれば直ちに使用を中止してください。
- ライトが暗い、点灯しない場合は電池交換(単4×2本)をおこなってください。
- 本製品は故障箇所にかかわらず修理致しかねます。故障時は新品の部品をお買い求めいただき、交換頂く形となります。

【耐用年数】チューブ：半年／電池ケース：1年 ※保証期間の定めはございませんが、初期不良の対応は致しております。

【発売元】

 Batel Plus Corporation  
株式会社 ベーテル・プラス

URL : <https://batelplus.jp> E-mail : [contact@batelplus.jp](mailto:contact@batelplus.jp)

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 新宿オミビル3F  
TEL 03-6427-6157

WEBサイト