


# ほつれ予防テープ


- 製品名：ほつれ予防テープ
- 製品コード：K0
- 長さ：2m
- JANコード：4580362080163
- 価格：1,320円 [税抜価格 1,200円] / 袋

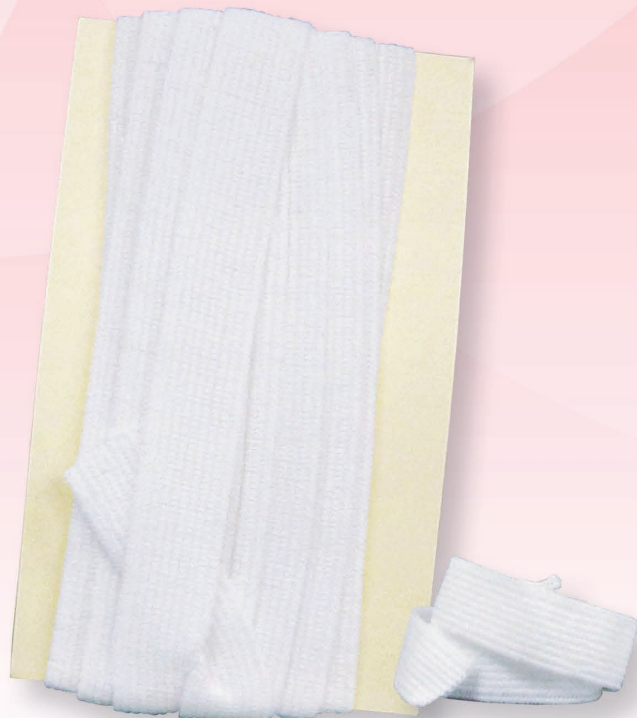

## 【用途】

チューブ包帯等をカットした際に、ほつれにくくするために本テープで補強をします。


## 【使用手順】

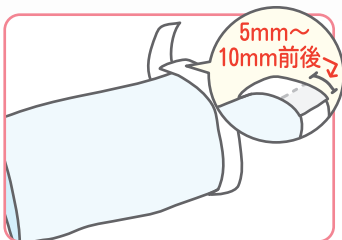

①断端部の生地外側に一周、テープの粘着面(光沢がある側)をあてます。この際にテープの巻き始めの部分に巻き終わりを5mm～10mm前後重ねると良いでしょう。



②テープをあてた上から中温のアイロンで押さええます。熱によりテープと包帯生地が接着されます。

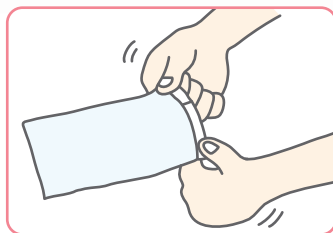

③接着を確認し、テープ部をすこし引き伸ばして、馴染ませてください。



④洗濯して繰り返しお使い頂けます。手洗いをお勧めします。

## 【注意点】

- 装着後、お肌への食い込みが無いことを確認し、テープ面は外側にしてご利用ください。
- ほつれ予防テープで加工した断端部は末梢側(心臓より遠い側)に位置する向きでの装着を推奨致します。
- 加工部分を過度に引き伸ばしますと、テープ自体がとれてしまう恐れがありますのでご注意ください。

【発売元】



Batel Plus Corporation  
株式会社 ベーテル・プラス



URL : <https://batelplus.jp> E-mail : [contact@batelplus.jp](mailto:contact@batelplus.jp)  
〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 新宿オミビル3F  
TEL 03-6427-6157 FAX 03-6427-6158



お問い合わせ

WEBサイト