

弾性着衣着脱補助グローブ

# BP ピタグローブ



手の甲側

手の平側

## 製品の特徴

- 日本人の手にピタッとフィット
- 細やかな指先の動きを実現
- 弾性着衣の着脱を日常的にサポート
- 高耐久性
- 手背は通気性の良いメッシュ素材
- ゴム製品特有のにおい対策（防臭加工）

## 製品の用途

- 手のひらサイドにグリップ力の強い滑り止めコーティングがされており、弾性着衣の着脱補助に最適です。
- シワ伸ばしにもお使いいただけます。
- 爪で弾性着衣を傷付けるリスクが減り、弾性着衣をより長持ちさせることができます。

製品コード	PG03XS	PG03S	PG03M
サイズ	XS	S	M
JANコード	4580362088787	4580362085502	4580362085519

**1,100円/双**

[税抜価格1,000円] (2本入)

<素材>ポリエステル、天然ゴム

## 「BP ピタグローブ」が、弾性着衣着脱時の多くの課題を解決

合同会社のあさとうリンパ浮腫研究所代表 佐藤 佳代子

患肢をサポートする高伸縮性の弾性着衣（スリーブ、ストッキング）は、着用している間は心地よくても、着脱には時間がかかります。できるだけ良いコンディションを維持するためにはき具合を微調整するうえで、ゴム手袋が指先まできちんと密着していないと、手や指への負担や必要以上の時間がかかってしまいます。

ゴム手袋については長年検討してまいりましたが、「BP ピタグローブ」は着脱時の多くの課題を解決してくれました。指先までピタッとフィットして、生地をしっかりと捉え、思い通りに弾性着衣の上げ下げの細やかな動きにも対応してくれます。通気性もよく、患者さんに寄り添うゴム手袋「BP ピタグローブ」の良さを日々実感しています。

発売元

**Batei** 株式会社 ベーテル・プラス

URL <https://batelplus.jp>

E-mail [contact@batelplus.jp](mailto:contact@batelplus.jp)

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 新宿オミビル3F

TEL 03-6427-6157

かんたん  
着脱

弾性着衣着脱補助具

# BP グリップシート

弾性着衣の着脱を補助するシートです。



製品名	BP グリップシート(小)	BP グリップシート(大)
製品コード	GS01	GS02
サイズ	20×27.5cm	30×40cm
JANコード	4580362083065	4580362083140
価格	2,200円[税抜2,000円]/枚	3,630円[税抜3,300円]/枚

<素材>ポリ塩化ビニール

## 使用方法

※シートを利用するのは **STEP 3** からです。




STEP  
1

グリップシートを床に置いてください。  
(絨毯ですと滑りやすく効果が発揮されませんので、安定した平らなフローリングの床を推奨します。)



STEP  
2

弾性ストッキングにそのまま足先を入れます。  
(この際、一般的なかかとまでの生地裏返しを行いません。)  
両手で足を包むように支えながら、生地を引き上げていきます。  
※写真のように滑り止め付きの補助グローブを併用いただくと、より効果的です。

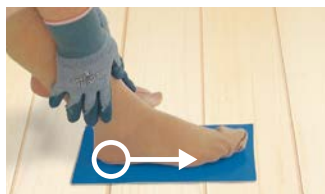

STEP  
3

かかとの位置まで来たら、足裏の生地をグリップシートにしっかり密着させたまま、足を前方に押し出すようにしながら、かかと部分を前方に滑らせ、同時に両手で生地を引き上げます。



STEP  
4

引き続き、両手で足を包むように支えながら、最後まで履き上げます。



STEP  
5

さいごに生地全体のシワをのばして整えます。

グリップシートの使い方を動画でご覧いただけます。



発売元

**Batel** 株式会社 ベーテル・プラス

URL <https://batelplus.jp>

E-mail [contact@batelplus.jp](mailto:contact@batelplus.jp)

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 新宿オミビル3F

TEL 03-6427-6157